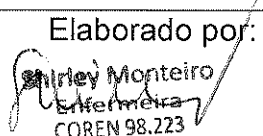
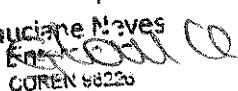
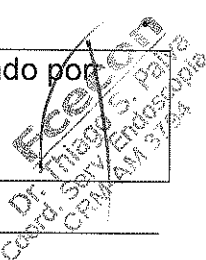


Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP DESINFECÇÃO DOS APARELHOS FLEXÍVEIS END-DAF/21

Rev: 00

Elaborado por:  Shirley Monteiro Enfermeira COREN 98.223	Verificado por:  Glauciane Neves Enfermeira COREN 98226	Aprovado por:  Shirley Monteiro Enfermeira COREN 98.223
---	--	--

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

CECON
Dr. Shirley S. Paiva
Coord. Serv. Endoscopia
CPM AM 3/2014

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP			Página: 1 de 2
Código END - /DAF - 21	Data Emissão JUNHO/2018	Data de Vigência 2018/2020	Próxima Revisão JUNHO/2020	Revisão 00
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA (SALA DE DESINFECÇÃO)				
ASSUNTO: DESINFECÇÃO DOS APARELHOS FLEXÍVEIS				
1. Objetivo:				
1.1 Evitar a transmissão cruzada de micro-organismos aos pacientes por ocasião das endoscopias digestivas, colonoscopias, broncoscopias e videolaringoscopia.				
2. Considerações Gerais:				
2.1 Caso o aparelho apresente algum vazamento ou escape de ar, não prossiga o processo de limpeza, pois a imersão em água ou solução enzimática pode infiltrar o aparelho, danificando-o. Informe o acontecido a chefia imediata do setor, a qual deverá solicitar conserto com manutenção autorizada.				
3. Materiais Necessários:				
3.1 E P I,				
3.2. Água corrente,				
3.3. Escovas para o canal das válvulas,				
3.4. Pano macio,				
3.5. Seringa,				
3.6. Detergente enzimático				
Responsável: EQUIPE DE ENFERMAGEM	PROCEDIMENTO			
	DESINFECÇÃO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Emergir totalmente o aparelho na solução desinfetante (Ácido Peracético) e introduzir solução nos canais com auxílio de uma seringa; 2. Cronometrar o tempo de imersão na solução desinfetante (10 MINUTOS); 3. Após retirar o aparelho do desinfetante lavar em água corrente abundante; 4. Realizar enxágue dos canais com água abundante (mínimo 5 vezes com auxílio de seringas); 5. Secar o tubo com pano macio; 6. Secar os canais com ar comprimido sob baixa pressão; 7. Realizar rinçagem com álcool 70% nos canais, seguido de nova secagem de lúmen com ar comprimido ao final do período de trabalho, evitando a formação de biofilme e auxiliando na secagem do canal; 8. Aplicar óleo de silicone nos anéis de borracha das válvulas; 9. Encaminhar os endoscópios para sala de armazenagem. 			

	5. SIGLAS E ABREVIATURAS END: ENDOSCOPIA DAF: DESINFECÇÃO DOS APARELHOS FLEXÍVEIS	
Sigla DAF	Revisão 00	Página 2 de 2

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).