
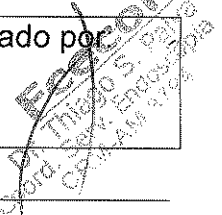


Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

Limpeza das ÓPTICAS END- LO/18

Rev: 00

Elaborado por:  Shirley Monteiro Enfermeira COREN 98.223	Verificado por: Glauciane Neves Enfermeira COREN 98226	Aprovado por:  Shirley Monteiro Enfermeira COREN 98.223
---	---	--

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP			Página: 1 de 1
Código END - /LO-18	Data Emissão JUNHO/2018	Data de Vigência 2018/2020	Próxima Revisão JUNHO/2020	Revisão 00
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA				
ASSUNTO: LIMPEZA DAS ÓPTICAS				
1. Objetivo:				
1.1 Evitar a transmissão cruzada de micro-organismos aos pacientes por ocasião, das Uretrocistoscopias e Histeroscopias.				
2. Considerações Gerais:				
2.1 Receber o material no expurgo somente com EPI completo.				
3. Materiais Necessários:				
3.1 Água,				
3.2 Escovas,				
3.3 EPI,				
3.4 Pistola de secagem (Ar comprimido)				
3.5 Pistola de lavagem				
3.6 Pano Macio				
Responsável: EQUIPE DE ENFERMAGEM	4. PROCEDIMENTO			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Receber material sujo em recipiente próprio (material contaminado); 2. Conferir a integridade da óptica; 3. Desconectar as peças da óptica; 4. Retirar o excesso de sujidade com água destilada e auxílio de escova de cerdas macias; 5. Retirar o excesso de água destilada; 			
	5. SIGLAS E ABREVIATURAS			
	END: ENDOSCOPIA LDO: LIMPEZA DAS ÓPTICAS			
Sigla LO	Revisão 00		Página 2 de 2	

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

FERRARI, Angelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.