

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP

### RECEBIMENTO DE MATERIAL RESPIRATÓRIO NO EXPURGO END- RMRE/15

Rev: 00

Elaborado por: <i>Shirley Monteiro</i> Shirley Monteiro Enfermeira COREN 98.223	Verificado por: <i>Glauiane Neves</i> Glauiane Neves Enfermeira COREN 10.223	Aprovado por: <i>Dr. Theodoro</i> Dr. Theodoro Coord. Serv. Endoscopia CPM/AM 3794
---	--	--

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

<b>FCECON</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b>			<b>Página:</b> 1 de 1
<b>Código</b> END - /RMRE-15	<b>Data Emissão</b> JUNHO/2018	<b>Data de Vigência</b> 2018/2020	<b>Próxima Revisão</b> JUNHO/2020	<b>Revisão</b> 00
<b>ÁREA EMITENTE:</b> SERVIÇO DE ENDOSCOPIA				
<b>ASSUNTO:</b> RECEBIMENTO DE MATERIAL RESPIRATÓRIO NO EXPURGO (AMBU, UMIDIFICADOR, BORRACHA DE O2, FRASCO DO VÁCUO)				
<b>1. Objetivo:</b> 1.1 Retirar o excesso da sujidade				
<b>2. Considerações Gerais:</b> 2.1 Não receber material sujo no EXPURGO ou encaminhar material sujo para o CME fora dos recipientes com tampa				
<b>3. Materiais Necessários:</b> 3.1 Água, 3.2 Escovas, 3.3 Recipiente com tampa, 3.4 EPI, 3.5 Pistola de Ar comprimido 3.6 Pistola de lavagem				
<b>Responsável:</b> EQUIPE DE ENFERMAGEM	<b>4. PROCEDIMENTO</b> 1. Receber material sujo em recipiente próprio (material contaminado); 2. Conferir a integridade do material; 3. Retirar o excesso de sujidade com água corrente e auxílio de escova e ou pistola de água de pressão em modo de média pressão (SN); 4. Retirar o excesso de água; 5. Separar em recipiente próprio com tampa (material sujo) 6. Registrar em livro de protocolo; 7. Encaminhar material à Central de Material e Esterilização.			
	<b>5. SIGLAS E ABREVIATURAS</b> <b>END:</b> ENDOSCOPIA <b>RMRE:</b> RECEBIMENTO DE MATERIAL RESPIRATÓRIO NO EXPURGO			
<b>Sigla</b> RMRE	<b>Revisão</b> 00		<b>Página</b> 2 de 2	