

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 1
ÁREA EMITENTE: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH		
ASSUNTO: LIMPEZA DA TÁBUA DE RESSUSCITAÇÃO		
1 Objetivo: 1.1 Manutenção da tábua de ressuscitação limpa;		
2 Considerações Gerais: 2.1 Aplicar em todas as unidades que possuem carro de emergência, após o uso da ocorrência;		
3 Materiais Necessários: 3.1 Fibra limpa; 3.2 Água; 3.3 Sabão; 3.4 Álcool a 70%; 3.5 Luvas de procedimento; 3.6 Papel toalha.		
Responsável: Equipe de Enfermagem	4 PROCEDIMENTO 4.1 Higienizar as mãos; 4.2 Preparar material necessário para o procedimento em uma bandeja; 4.3 Calce as luvas de procedimentos; 4.4 Limpe a superfície com água e sabão; 4.6 Retire o sabão com o auxílio da fibra umedecido com água; 4.7 Seque com o pano limpo e seco; 4.8 Friccione uma fibra embebida em álcool em toda a parte externa da tábua; 4.8 Retire as luvas e higienize as mãos; 4.9 Guarde a tábua no carrinho de emergência.	
Sigla LCE	Página 1 de 1	

REFERÊNCIA

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem:** guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Limpeza da Tábua de Ressuscitação CCIH- LCR/119

Rev: 03

Código CCIH – LTR/119	Data Emissão SETEMBRO/2023	Data de Vigência 2023/2026	Próxima Revisão SETEMBRO/2026	Revisão 03
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------

Elaborado por: <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCIH</i> <i>COREN:98226</i>	Verificado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Aprovado por: <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida reprodução.