

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 1
<b>ÁREA EMITENTE:</b> SERVIÇO DE ENDOSCOPIA		
<b>ASSUNTO:</b> RECEBIMENTO DE MATERIAL RESPIRATÓRIO NO EXPURGO (AMBU, UMIDIFICADOR, BORRACHA DE 02, FRASCO DO VÁCUO)		
<b>1. Objetivo:</b> 1.1 Retirar o excesso da sujidade		
<b>2. Considerações Gerais:</b> 2.1 Não receber material sujo no EXPURGO ou encaminhar material sujo para o CME fora dos recipientes com tampa		
<b>3. Materiais Necessários:</b> 3.1 Água, 3.2 Escovas, 3.3 Recipiente com tampa, 3.4 EPI, 3.5 Pistola de Ar comprimido 3.6 Pistola de lavagem		
<b>Responsável:</b> EQUIPE DE ENFERMAGEM	<b>4. PROCEDIMENTO</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Receber material sujo em recipiente próprio (material contaminado);</li> <li>2. Conferir a integridade do material;</li> <li>3. Retirar o excesso de sujidade com água corrente e auxílio de escova e ou pistola de água de pressão em modo de média pressão (SN);</li> <li>4. Retirar o excesso de água;</li> <li>5. Separar em recipiente próprio com tampa (material sujo)</li> <li>6. Registrar em livro de protocolo;</li> <li>7. Encaminhar material à Central de Material e Esterilização.</li> </ol>	
<b>5. SIGLAS E ABREVIATURAS</b> <b>END:</b> ENDOSCOPIA <b>RMRE:</b> RECEBIMENTO DE MATERIAL RESPIRATÓRIO NO EXPURGO		
<b>Sigla</b> RMRE	<b>Página</b> 2 de 2	

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP

### RECEBIMENTO DE MATERIAL RESPIRATÓRIO NO EXPURGO END- RMRE/15

**Rev: 03**

<b>Código</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data de Vigência</b>	<b>Próxima Revisão</b>	<b>Revisão</b>
END – RMRE/15	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por:  <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Verificado por:  <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	Aprovado por:  <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
---	--	---