

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 1
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA		
ASSUNTO: LIMPEZA DAS ÓPTICAS		
1. Objetivo: 1.1 Evitar a transmissão cruzada de micro-organismos aos pacientes por ocasião, das Uretrocistoscopias e Histeroscopia.		
2. Considerações Gerais: 2.1. Receber o material no expurgo somente com EPI completo; 2.2 Sempre limpar cada ótica individualmente; 2.3 Não as limpar juntamente com outras óticas ou com outros instrumentos; 2.4 Assegurar-se de que as óticas não tocam umas nas outras. 2.5 Não usar água da torneira, pois esta pode ter cloro.		
3. Materiais Necessários: 3.1 Água, 3.2 Escovas, 3.3 EPI, 3.4 Pistola de secagem (Ar comprimido) 3.5 Pistola de lavagem 3.6 Pano Macio		
Responsável: EQUIPE DE ENFERMAGEM	4. PROCEDIMENTO <ol style="list-style-type: none"> 1. Receber material sujo em recipiente próprio (material contaminado); 2. Conferir a integridade da ótica; 3. Desconectar as peças da ótica; 4. Remova todos os adaptadores da conexão do cabo de fibras óticas da ótica; 5. Retirar o excesso de sujidade com o auxílio das pistolas de água e detergente com o auxílio de escova de cerdas macias; 6. Imergir no detergente enzimático, deixando por 5 minutos (de acordo com as recomendações do fabricante). 7. Retirar e lavar em água corrente e secar com o auxílio da pistola de ar comprimido; 8. Encaminhar a sala para desinfecção em recipiente adequado. 	
5. SIGLAS E ABREVIATURAS END: ENDOSCOPIA LDO: LIMPEZA DAS ÓPTICAS		
Sigla LO	Página 1 de 1	

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

FERRARI, Ângelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.

ANVISA- RDC Nº 6, DE 10 DE MARÇO DE 2013. DISPÕE SOBRE OS REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS DE FUNCIONAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA COM VIA DE ACESSO AO ORGANISMO POR ORIFÍCIOS EXCLUSIVAMENTE NATURAIS.

SOBEEG. Sociedade Brasileira de Enfermagem em Endoscopia Gastrointestinal. Manual de Limpeza e Desinfecção de Aparelhos Endoscópicos .

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP

Limpeza das ÓPTICAS END - LO/18

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
END – LO -18	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: Skirley Fragoso Monteiro Chefe Departamento de Enfermagem COREN: 98228	Verificado por: Glauciane Moreira Neves Presidente da CCJH COREN:98226	Aprovado por: Marielle Colares M Martins Gestora do NSP COREN: 146256
---	--	---

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.