

<b>FCECON</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b>	<b>Página:</b> 1 de 1
<b>ÁREA EMITENTE:</b> SERVIÇO DE ENDOSCOPIA		
<b>ASSUNTO:</b> DESINFECÇÃO DAS ÓPTICAS		
<b>1. Objetivo:</b> 1.1 Evitar a transmissão cruzada de micro-organismos aos pacientes por ocasião, das Uretrocistoscopias e Histeroscopias.		
<b>2. Considerações Gerais:</b> 2.1. Receber o material do expurgo somente com EPI completo.		
<b>3. Materiais Necessários:</b> 3.1 Água, 3.2 Escovas, 3.3 EPI, 3.4 Pistola de secagem (Ar comprimido) 3.5 Pistola de lavagem 3.6 Pano Macio 3.7 Ácido peracético		
<b>Responsável:</b> EQUIPE DE ENFERMAGEM	<b>4. PROCEDIMENTO</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar testes diários com fitas reagentes no desinfetante que encontra-se em uso, para garantir ótima atividade do produto (perda de eficácia e estabilidade do produto).</li> <li>2. Garantir que a ótica esteja limpa e completamente seca antes da imersão.</li> <li>3. Imergir a ótica e as peças na solução de ácido peracético. (O tempo de imersão deve ser seguido conforme orientação do fabricante);</li> <li>4. Retirar o material da solução do ácido peracético e lavar com água destilada;</li> <li>5. Secar a ótica e peças com pistola de ar comprimido e conectar as peças enroscáveis;</li> <li>6. Acondicionar em local adequado (Sala de Exame 1)</li> </ol>	
<b>5. SIGLAS E ABREVIATURAS</b> <b>END:</b> ENDOSCOPIA <b>DO:</b> DESINFECÇÃO DAS ÓPTICAS		
<b>Sigla</b> DO	<b>Página</b> 1 de 1	

## **REFERÊNCIAS:**

**BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).**

**FERRARI, Angelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.**

**ANVISA- RDC Nº 6, DE 10 DE MARÇO DE 2013. DISPÕE SOBRE OS REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS DE FUNCIONAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA COM VIA DE ACESSO AO ORGANISMO POR ORIFÍCIOS EXCLUSIVAMENTE NATURAIS.**

**SOBEEG. Sociedade Brasileira de Enfermagem em Endoscopia Gastrointestinal. Manual de Limpeza e Desinfecção de Aparelhos Endoscópicos .**

# Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

## Procedimento Operacional Padrão- POP

### DESINFECÇÃO ÓPTICAS END - DO/19

**Rev: 03**

<b>Código</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data de Vigência</b>	<b>Próxima Revisão</b>	<b>Revisão</b>
CCIH –DO/19	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por:  <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Verificado por:  <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	Aprovado por:  <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
---	--	---