



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 027 – SCIH – FCECON Página: 1/3	
Título do Documento	LIMPEZA DO CARRO DE EMERGÊNCIA	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: LCE

Elaboração: Enfª Marielle Colares Magalhães Martins Coordenadora da CCIH	
Revisão: Drª Silvia Souza Infectologista da CCIH	
Aprovação: Drª Hilka Flávia Barra do Espírito Santo Alves Pereira Diretora Técnica da Fcecon	

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 027 – SETOR - FCECON Página: 2/3	
Título do Documento	LIMPEZA DO CARRO DE EMERGÊNCIA	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: LCE

1. OBJETIVOS:

1.1. Manutenção do carro de emergência limpo;

2. FINALIDADES:

2.1. Aplicar em todas as unidades que possuem carro de emergência, após o uso da ocorrência;

3. MATERIAIS:

- 3.1. Fibra limpa;
- 3.2. Água;
- 3.3. Sabão;
- 3.4. Álcool a 70%;
- 3.5. Luvas de procedimento;
- 3.6. Papel toalha/pano limpo.

4. RESPONSÁVEL:

4.1. Equipe de Enfermagem.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

- 5.1. Higienizar as mãos;
- 5.2. Preparar material necessário para o procedimento em uma bandeja limpa;
- 5.3. Retire os medicamentos, materiais, soluções e equipamentos eletrônicos do carro de emergência;
- 5.4. Calce as luvas de procedimentos;
- 5.5. A limpeza e desinfecção concorrente/terminal do carro de emergência e do desfibrilador deverão ser realizadas com compressa úmida bem torcida com pouco sabão neutro, finalizando com compressa limpa embebida em álcool 70% (desinfecção), exceto no visor do monitor;
- 5.6. A desinfecção concorrente do laringoscópio (diária) deverá ser realizada com compressa embebida com álcool 70%, concomitantemente, a sua testagem funcional;
- 5.7. Os laringoscópios testados e desinfetados deverão ser armazenados em uma caixa limpa e seca, situada sobre a base superior do carro de emergência;
- 5.8. Retire as luvas e higienize as mãos;
- 5.9. Guarde todas as medicamentos, soluções e materiais.

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 027 – SETOR - FCECON Página: 3/3	
Título do Documento	LIMPEZA DO CARRO DE EMERGÊNCIA	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: LCE

Unidades do Carro de Emergência	Limpeza/Desinfecção Concorrente	Limpeza/Desinfecção Terminal
Carro de Emergência	1x/dia externamente	1x/mês interna e externamente
Desfibrilador	1x/dia	
Laringoscópios	1x/dia	
Tábua de Emergência	1x/dia	

6. REFERÊNCIA:

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária **Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde**. Brasília: Anvisa, 2017.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (COREN). Parecer COREN-PE **Ementa: Carro de Emergência: Composição, responsabilidade pela montagem, conferência e reposição**. COREN, São Paulo, 2013.

GONZALEZ, M.M., TIMERMAN, S., GIANOTTO-OLIVEIRA, et al. (2013) **I Diretriz de ressuscitação cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia**. Arq. Bras. De Cardiologia, 101 (2), 1.

Manual do carro de emergência – HU-UFGD/EBSERH, 2018. 15p.

Protocolo Assistencial Multiprofissional: Carro de Emergência – Serviço de Educação em Enfermagem da Divisão de Enfermagem do HC-UFTM. Núcleo de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais do HCUFTM, Uberaba, 2018. 25p.